

## Produktinformation

# eimü Cell-Check 1 Liter, Milch-Zelltest zur sicheren Mastitis Früherkennung

Art-Nr.: 03-173 / GTIN: 4105170207061 / Marke: [Eimü](#)



UVP 8,80 EUR

**8,80 EUR** / Stück

Grundpreis: 8,80 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage  
15 auf Lager

eimü Cell-Check ermöglicht einen schnellen und aussagekräftigen Schalmtest zur Bestimmung des Gesundheitszustandes jedes einzelnen Euterviertels einer Kuh. Das innovative Reagenzsystem ermöglicht eine zuverlässige Einordnung bereits ab dem Schwellenwert von 100.000 somatischen Zellen je ml Milch. Damit ist eimü Cell-Check einer der sensibelsten Schalmtests, der bei vielen Versuchs- und

## Produktinformation

---

Ausbildungseinrichtungen sowie bei offiziellen Melkwettbewerben zum Einsatz kommt. Im Rahmen eines modernen Mastitis-Controllings ist eimü Cell-Check das effektivste Mittel um vor dem Trockenstellen, nach der Kalbung oder bei Verdachtsfällen in der Laktation den Schutz der Eutergesundheit proaktiv im Fokus zu halten.

### **Vorteile:**

- . Schnelle Resultate: Schon nach 5 sec. kann die Eutergesundheit beurteilt werden
- . Sensible Ergebnisse: Der eimü Cell-Check 3S weist mit einer um 20% höheren Sensibilität zuverlässig Anzeichen von erhöhten Zellzahlgehalten nach
- . Sichere Interpretation: Die innovative Gel-Farbbildung differenziert die Viertelgesundheit schon unterhalb der bisherigen Nachweisgrenze
- . Fehlerfreie Handhabung: Die exakte Testmilchmenge wird einzigartig und fehlerfrei durch einfaches Aufstellen der Kippschale eingestellt
- . Sichere Einhanddosierung: Je Feld wird eine Hubeinheit der Cell-Check 3S Reagenz hinzugegeben

### **Anwendung:**

- . Schritt 1: Die ersten Milchstrahlen verwerfen, dann das Viertel-Anfangsgemelk in das entsprechende Feld der Kippschale melken.
  - . Schritt 2: Mit der neuen eimü Cell-Check Kippschale auf der sicheren Seite: Durch kurzes Abstellen der Cell-Check Kippschale oder durch Abkippen der Milch bis zur Strichmarkierung verbleibt exakt die testrelevante Milchmenge.
  - . Schritt 3: Je Feld eine Hubeinheit der eimü Cell-Check 3S Reagenz hinzugeben.
  - . Schritt 4: Schale einige Sekunden langsam kreisen.
  - . Schritt 5: Ergebnis sofort mit der eimü Cell-Check 3S Testkarte ablesen und protokollieren.
-



## Produktinformation

---

**Wichtig:** Routinezuordnung des Schalen- zum Euterviertel beibehalten, um Verwechslungen zu vermeiden.

**Tipp:** Lassen Sie das Aufhängeloch immer zum Schwanzende des Tieres zeigen, dann befindet sich Schale A immer am Vorderviertel links. Vor Gebrauch durch mehrmaliges Pumpen Flüssigkeit in die Dosierpumpe ansaugen.

### **Technische Daten:**

- . Inhalt: 1 Liter
- . Gebinde: Kanister

### **Anwendungsbereiche:**

- . Zur sicheren Mastitis Früherkennung bei Kühen und Rindern

### **Lieferumfang:**

- . 1x eimü Cell-Check 1 Liter